

AKTUELLE INFORMATION FÜR UNSERE EINSENDER

Anleitung zur Gewinnung von Rachenspülwasser zur SARS-CoV-2-Diagnostik (Gurgeltest)

Mai 2021

- **Benötigtes Material:** Rachenspülwasser (0,9% NaCl-Lösung), Strohhalm, Neutralröhrchen, Namensetiketten.
- Eine Stunde vor der Probenentnahme nicht essen, rauchen oder Zähne putzen.
- Hände waschen und desinfizieren.
- Hinweis: Während des Gurgelns kann es zur Bildung von Aerosolen kommen. Durchführung der Probengewinnung möglichst alleine im Raum oder mit Sicherheitsabstand, anschließend gut durchlüften.
- Das Probengefäß muss mit Namen, Vorname und Geburtsdatum beschriftet werden.
- **Inhalt der Ampulle in den Mundraum drücken.**
- **Lassen Sie die gesamte Flüssigkeit nun in den Rachenraum fließen (nicht schlucken!)**
- **Gurgeln Sie ca.30 Sekunden! (einfaches Mundspülen ist nicht ausreichend!)**
- Anschließend führen Sie mit dem Strohhalm die Gurgelflüssigkeit in das Röhrchen.
- Verschließen Sie das Röhrchen sorgfältig.
- Sollte es Probleme beim Gurgeln geben, dann bitte den Vorgang mit einer zweiten Ampulle Gurgellösung wiederholen.
- Das Probengefäß und der Auftragschein werden in eine separate Tüte gegeben.
- Die Probe ist vor Versand bei 2-8°C zu lagern.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Praxisbetreuung gerne unter der Rufnummer 030 77001-181 zur Verfügung.

Ihre Praxisbetreuung